


Viking M

Guía de Referencia Rápida

Español

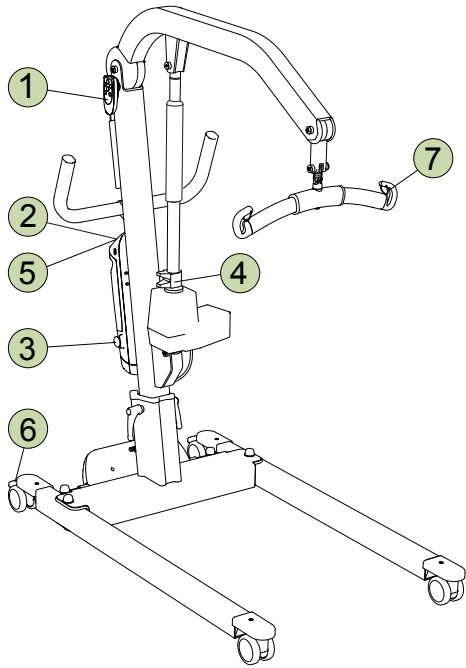


1 Mando IR



¡NOTA! Si no se ha usado la grúa durante más de 24 horas, antes de que el mando IR se pueda usar, el sistema debe activarse pulsando cualquier botón del panel de control del caja de control.


📖 Lea la guía de instrucciones para más información.

2 Panel de control

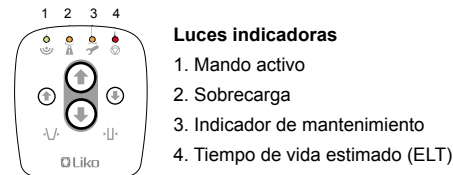


📖 Lea la guía de instrucciones para más información.


3 Parada de emergencia

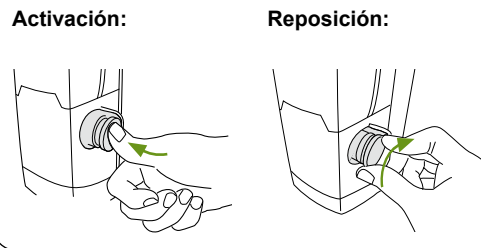


4 Bajada de emergencia mecánica

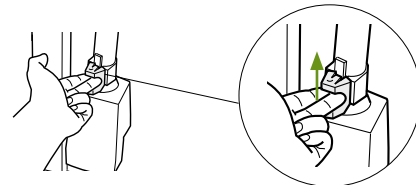


5 Bajada/subida de emergencia eléctrica

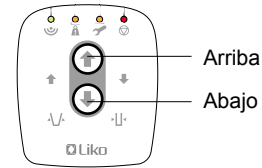


6 Bloqueo de las ruedas

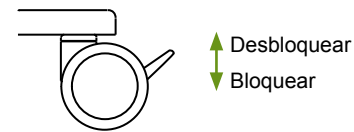

7 Protección anti-desenganche

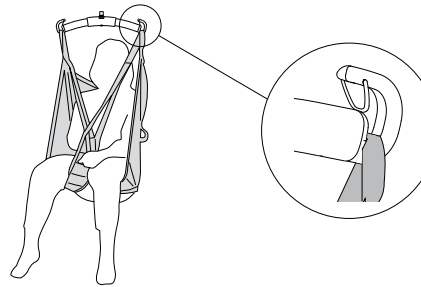

Carga de baterías

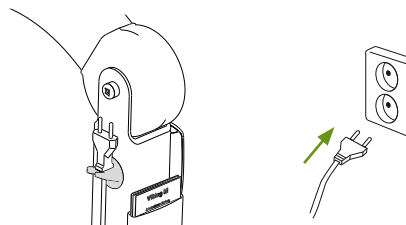

- Cargue la grúa regularmente después de haberla utilizado.
- La grúa no funciona durante el proceso de carga de la batería.
- **Esta grúa no se puede cargar con la parada de emergencia activada.**

Ergonomía

- Evite las elevaciones manuales – deje que la grúa haga el trabajo.
- No se estrese – trabaje con calma y metódicamente.
- Piense en su espalda – trabaje erguido y con la espalda recta.
- Use las funciones de elevación y descenso de la cama.
- Reduzca el efecto de palanca: trabaje cerca del paciente y de la grúa.

Limpieza

Cuando sea necesario, limpie la grúa, utilizando un trapo humedecido con agua caliente o alcohol higiénico.

Posibles problemas

Compruebe que:

- la parada de emergencia no está pulsada, ver ③
- la batería de la grúa esta cargada
- la grúa has estado en uso las últimas 24 horas, ver ①
- el mando no indica reemplazo de batería ver ① A.

Otras guías de referencia rápidas

La guía de referencia rápida para las grúas y arneses de Liko pueden descargarse desde el sitio Web www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabricante:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

¡IMPORTANTE!

Esta guía de referencia rápida no sustituyen a la guía de instrucciones de la grúa, la cual se puede descargar desde www.liko.com.